

AMPLICALL5030

Detektor zvonjenja



Čestitamo za nakup naprave Geemarc AMPLICALL 40/30.

AMPLICALL 30 je prenosna »baby« enota, katera posluša otroške glasove in jih pošilja na sprejemno enoto. To pomeni, da ko se nahajate v drugem prostoru kot vaš otrok, lahko spremljate njegovo počutje oziroma stanje.

AMPLICALL40 vsebuje brneči zvonec, in ko ga priključimo se izključi notranji mikrofoni. Eden od namenov naprave AMPLICALL40 je zaznavanje hišnega zvonca.

Paket vključuje:

- 1 AMPLICALL TM30/40 enota
- 3 AAA baterije
- 1 zunanjo brenčalo (samo AMPLICALL TM40)

NASTAVITVE

Za delovanje prenosnega nadzora, odprite predel ki je namenjen baterijam (na zadnji strani naprave). Vstavite vanj 3 baterije (velikosti AAA, 1.5V), ter pri tem pazite na pravilno lego (tako kot je označeno na dnu predalčka). Nato jih nazaj zaprite s pokrovčkom, ki je temu namenjen.

Prestavite stikalo vklop/izklop na položaj »ON«, da prične naprava delovati.

POZOR: Ko LED lučka utripa rdeče, pomeni da je čas za menjavo baterij.

Alternativno Lahko uporabite tudi omrežni adapter (ni priložen). Enostavno ga priklopite v priključek na levi strani naprave, drugi del pa v mrežno vtičnico.

MONTAŽA

Postavite napravo AMPLICALL30 v prostor, kjer je vaš otrok, tko da bo lahko naprava iz prostora povzemala zvoke vašega otroka. AMPLICALL TM30 se lahko obesi na steno, s pomočjo obešalnega kavlja, lahko se jo pričvrsti na steno (glej spodaj) ali enostavno položi na mizo.

MONTAŽA NA ZID:

1. Horizontalno pritrdimo dva vijaka v steno z medsebojno razdaljo 42.5mm.

2. Nasadimo AMPLICALL30 na že nameščene vijake na steni, ter jo nekoliko potisnemo navzdol.

RAZDALJA

Postavite napravo vsaj 1 meter stran od vašega otroka, ter tako zagotovite da je naprava izven njegovemu dosegu. V nobenem pogoju ne postavljajte oz. puščajte katerega koli dela naprave na otroški posteljici. Za najboljše delovanje, naprave ne postavite dlje od 4 metrov od vašega otroka.

POSTOPEK POVEZOVANJA

S premikanjem gumba lahko zbiramo med štirimi različnimi časi zakasnitve. Je zelo uporabna funkcija, saj lahko nastavite zakasnitev in tako dobite signal kasneje, kot jo je naprava zaznala. Morda želite dobiti kasnejši poziv o budnem položaju otroka, da ne reagirate prekmalu. Če želite prejeti takojšnji signal jokanja vašega otroka, potem nastavite zakasnitev na minimum oz. 0.75s.

Če vaš otrok joka s prekinitvami, nastavite na 5 sekund, in naprava vas bo obvestila čez 5 sekund po zaznanem prvem joku.

Če pa vaš otrok joka neredno in s prekinitvami ter želite biti ta čas sproščeni in čakati na morebitno ponehanje nastavite zakasnitev na 10 do 30 sekund.

PREKINITEV POVEZAVE Z AMPLICALL20, AMPLICALL50 ali CL2L

1. Pritisnite in 5 sekund držite gumb za povezovanje/testiranje na sprejemni enoti (AMPLICALL TM20, AMPLICALL TM50 ali CL2L) , dokler ne zasveti LED lučka, kar pomeni da je naprava prekinila povezavo.

2. Pritisnite gumb za povezovanje/testiranje na sprejemniku (AMPLICALL TM20, AMPLICALL TM50 ali CL2L), da prva LED lučka sveti. Pritisnite in držite gumb za povezovanje/testiranje dokler prva LED lučka ne ugasne in naprava odda pisk. AMPLICALL TM30 je tako prekinila povezavo.

UPORABA AMPLICALL30

Ko naprava zaznava zvok/jok ali če pritisnete gumb za alarm, vas bo zunanja (z notranjo povezana) naprava obvestila z zvokom.

UPORABA AMPLICALL40

Naprava ima uporabne lastnosti in deluje na enak način kot AMPLICALL TM30. Priložen ji je tudi dodatek in sicer brenčalo. Če namestite brenčalo na napravo AMPLICALL in ga prilepите na zvonec, bo naprava izklopila notranji mikrofون in bo za zaznavanje uporabljala brenčalo.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Aparat se ne vklopi:

- Preverite če so baterije polne in pravilno nameščene.
- Preverite povezavo za omrežno napajanje.

Aparat oddaja visoke frekvence (piska):

- Preverite če sta Amplicall 50 in Amplicall 30/40 vsaj 3 metre narazen.
- Znižajte glasnost.

Aparat ne oddaja alarma oziroma samo občasno:

- Preverite če sta napravi pravilno povezani. Ponovite postopek povezovanja naprav.
- Preverite če sta oba aparata vključena.
- Preverite če je jakost zadostna.
- Preverite če so baterije polne in pravilno nameščene.
- Preverite povezavo za omrežno napajanje.
- Preverite če sta aparata v območju delovanja.
- Nastavite časovni zamik na manj in zaznavnost zvoka na več.

Kvaliteta zvoka se je poslabšala:

- Preverite če so baterije polne in pravilno nameščene.

Rdeča LED lučka utripa:

Zamenjajte baterije ali priključite aparat na omrežno napajanje.

VARNOSTNE INFORMACIJE

SPLOŠNO

- Ne odpirajte aparata (razen za zamenjavo baterij). Za popravilo kontaktirajte proizvajalca.
- Ena od funkcij Amplicall 50 je pomoč pri nadzoru vašega otroka, kar pa ni nadomestilo za nadzor odrasle osebe.
- Ta aparat ni igrača.
- Vaš nadzor se prenaša po javnih frekvencah. Vaš pogovor se lahko sliši preko drugega aparata ki deluje na enakih frekvencah.
- Električne aparate in kable vedno hranite tako da so nedosegljivi otrokom.
- Poskrbite da se otroci ne spotaknejo ali zapletejo v kable.

ČIŠČENJE

- Aparat čistite z mehko krpo.
- Nikoli ne uporabljajte loščil ali čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo površino ali elektroniko v notranjosti.
- Pred čiščenjem izklopite aparat iz mrežnega napajanja.

OKOLJE

- Aparata ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi.
- Vedno poskrbite da je okoli aparata zagotovljena zračna pretočnost.
- Aparat nikoli ne dajte v vodo ali ga izpostavite previsoki vlagi.
- Aparata nikoli ne izpostavite ognju ali podobnim nevarnim situacijam.

BATERIJE

- Odstranjevanje in zamenjavo baterij lahko opravi oziroma nadzoruje samo odrasla oseba.
- Bodite pozorni da so baterije vstavljene pravilno (glejte skico v predalčku).
- Vedno odstranite prazne baterije.
- Ne uporabite baterij za ponovno polnjenje.
- Ne uporabite starih (praznih) in novih baterij naenkrat.
- Ne uporabite baterij različnih proizvajalcev.
- Baterij ne odvrzite med navadne odpadke. Bodite pozorni na predpise o ravnanju z nevarnimi odpadki.
- Odstranite baterije če aparata ne uporabljate dalj časa.
- Uporabite samo baterije istega ali podobnega tipa kot je priporočeno