


GEEMARC

CLEAR SOUND™

HEAR THE DIFFERENCE

CL7300

Digitalne TV slušalke

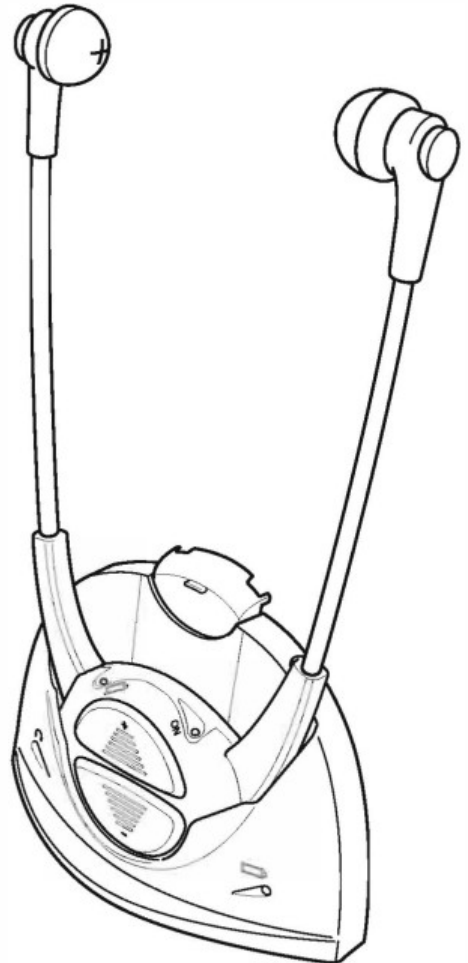

UK Introduction

Geemarc Digital TV Slušalke so ojačan sistem posebno ustvarjen za ljudi z okvaro sluha.

Lahko se uporabljajo skupaj z različnimi avdio napravami, televizijami in so primerne za skupinsko ali individualno poslušanje.

Avdio izhod televizije ali avdio naprave je kodiran in prenešen prek oddajnika, brezžične slušalke pa signal sprejemajo in dekodirajo v zvok.

En oddajnik se lahko uporablja z največ štirimi pari slušalk.



Nasveti za varnost in vzdrževanje

Da bi zagotovili optimalno in varno uporabo te naprave, prosimo natančno preberite ta navodila in jih shranite za kasnejši vpogled.

Opozorilo: Ta naprava je lahko zelo glasna. Poskrbite, da drugi ne uporabljajo te naprave, če nimajo enake stopnje naglušnosti. Prekomerni zvočni tlak vušesnih in naušesnih slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

Previdnost: Električni šok. NE vklaplajte nepovezanih vtičačev v električne vtičnice. Vtičači MORAJO biti povezani z napajalnim adapterjem.

Električna povezava: Naprava je zasnovana, da deluje na 100-240VAC - 50/60Hz napajanju. (Klasificirano kot 'visoka napetost' po EN 60950 standardu).

Naprava ne vsebuje stikala za vklop ali izklop električne napetosti. Za izklop naprave iz električnega omrežja izključite AC adapter iz električne vtičnice ali izklopite električno vtičnico iz električne omrežja.

Previdnost: Baterija lahko eksplodira v primeru, da jo zamenjate z napačnim tipom baterije. Porabljene baterije menjajte v skladu z navodili.

Napravo hranite izven dosega virov toplote.


NE izpostavljajte naprave direktni sončni svetlobi.

Redno čistite slušalke in ušesne blazinice.


NE posegajte v napravo na kakršenkoli način.

Prosimo upoštevajte: Pri delovanju naprave lahko motnje povzročijo druge naprave, ki ustvarjajo močno elektromagnetno polje, kot so mikrovalovne pečice, mobilni telefoni, transformatorji ipd.

Vsebina

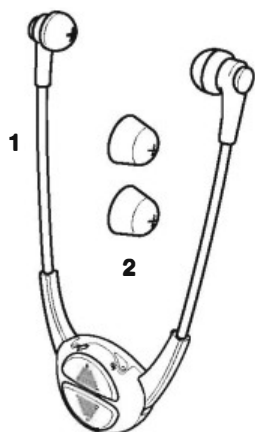

1

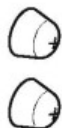

2

3



4



5



6

7




8



9



10

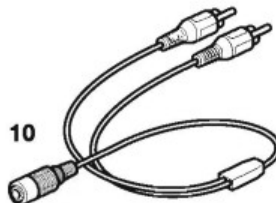

11

12



- 1. Slušalke
- 2. Dodatne ušesne blazinice
- 3. Oddajnik
- 4. Vtičniki (UK, US & EU)
- 5. Orodje za potisk
- 6. Baterije

- 7. Napajalni adapter (1.5m)
- 8. 3,5mm do 3,5mm kabel (1,5m)
- 9. 3,5mm do 6.3mm adapter
- 10. 3 5mm do 2 pin RCA kabel (25cm)
- 11. 2 pic RCA scart adapter
- 12. Mikrofon

Kazalo

Vsebina	_____ 2	Povezovanje enot	_____ 14
Prva uporaba / Polnjenje baterije	_____ 3 - 5	Čiščenje in vzdrževanje	_____ 16
Povezovanje s Hi-Fi ipd.	_____ 6 - 8	Menjava delov	_____ 17
Uporaba slušalk	_____ 9	Pomoč uporabnikom	_____ 17
Prilaganje slušalk	_____ 10 - 12	Splošne informacije	_____ 17
Status baterije in polnjenje	_____ 13		

Prva uporaba / Menjava baterij

Pomembno: Geemarc TV slušalke vsebujejo dve bateriji. Pred uporabo je potrebno baterijo popolnoma napolniti. Izpraznjena baterija se polni 2 - 3 ure, da se popolnoma napolni.

Pozor: V primeru, da je baterija popolnoma polna, rdeča led lučka ne sveti. Popolnoma napolnjene TV slušalke so v stanju pripravljenosti približno 3 ure (na posamezno baterijo in ob srednji glasnosti slušalk).


Baterij ne morete prekomerno napolniti. Za varčevanje z energijo izključite oddajnik iz električnega omrežja.




Opozorila za baterijo

- **NE** poizkušajte razstavljati naprave. • **NE** izpostavljajte ognju.
- **NE** pogoltnite.
- Hranite izven dosega otrok.
- Baterije vstavljajte s pravilno polariteto.
- **NE** povzročajte kratkega stika na napetostnih virih.
- Prazne baterije odstranite iz naprave.
- Uporabljajte izključno priložene Geemarc "Li-Po" baterije.
- **Pozor:** Baterija lahko eksplodira v primeru, da je bila napačno vstavljena ali menjana z napačnim tipom baterije. Prazne baterije reciklirajte v skladu z navodili.





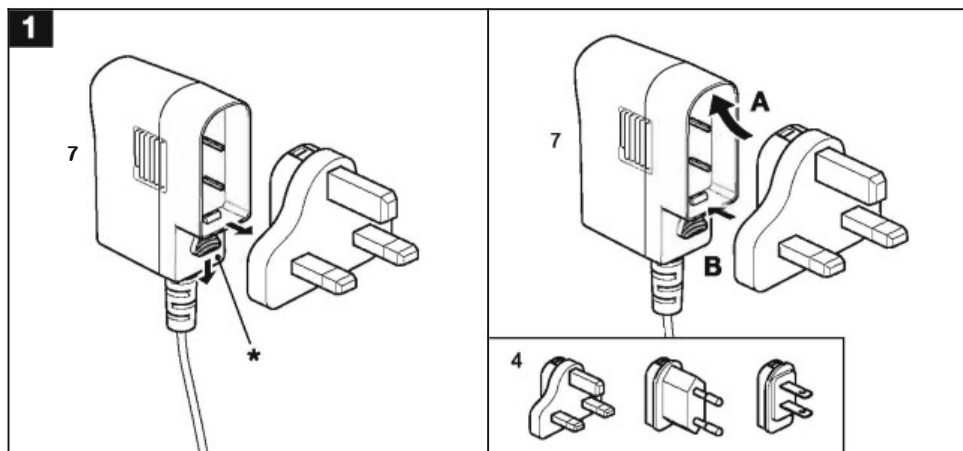

Menjava nastavka električnega vtičnika: V primeru, da potrebujete drugačen nastavek, povlecite stikalo(*) navzdol in odstranite nastavek. Izberite primeren nastavek (4). **A:** Vstavite vrh nastavka pod kotom (7). **B:** Pritisnite nastavek v električni vtičnik dokler ne slišite "klika", ki pomeni, da se je nastavek pravilno zataknil.

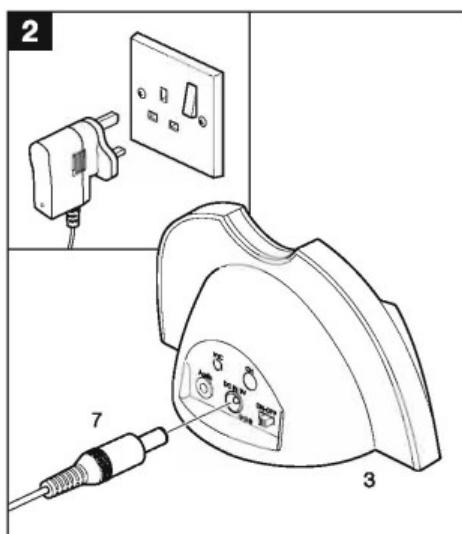

Vstavite električni vtičnik v vtičnico. Priključite napajalni kabel (7) v zadnjo "DC IN 5V" vtičnico na oddajniku.

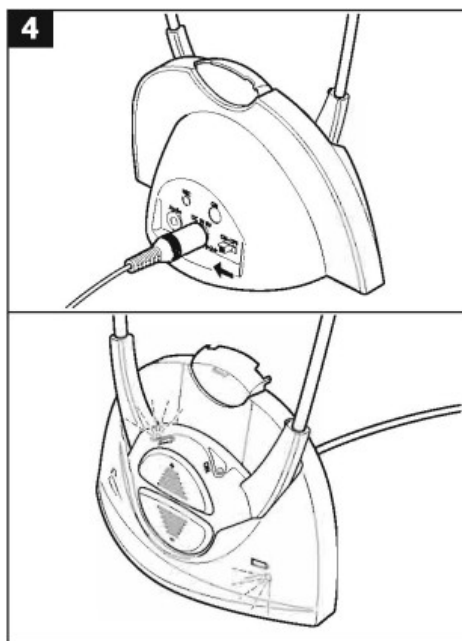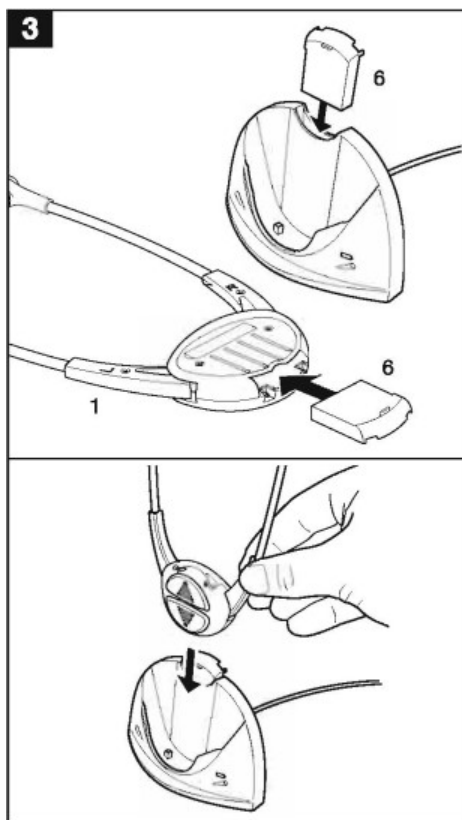

Vstavite baterijo (6) v slušalke in oddajnik.
 Slušalke položite na oddajnik.
POZOR: Prepričajte se, da so baterije pravilno vstajlene (glejte zgoraj).

Vklopite napajanje in oddajnik.
 Na oddajniku in slušalkah se bo prižgala rdeča lučka, kar signalizira, da se baterije polnijo.
 Po končanem polnjenju (2 - 3 ure) se bo rdeča lučka ugasnila.





Povezovanje s TV, HiFi in ostalimi avdio napravami

Obstaja več načinov za povezovanje naprav s slušalkami. Izberite primeren postopek glede na vrsto priključkov na vašem TV ali HiFi opremi.

Pomembno: Oddajnik MORA biti povezan z "OUTPUT" izhodom na televiziji ali HiFi opremi (nikoli ne uporabljajte vhodnih "INPUT" vtičnic).

Pomembno: V primeru, da uporabljate kabelsko televizijo, satelitsko, Internet ali ostali storitve v kombinaciji z vašo televizijo ali HiFi opremo, se prepričajte, da ste slušalke CL7300 priključili v avdio izhod "OUTPUT" na vaši televiziji in NE v internetni, kabelski, satelitski vmesnik. Če niste prepričani ali ste napravo pravilno povezali, prosimo, preberite navodila za vašo televizijo. V primeru, da vklopite slušalke CL7300 v internetni, kabelski, satelitski vmesnik, se zna zgoditi, da bodo nekateri kanali brez zvok.

Pomembno: V primeru, da imate težave s priklopom naprave, prosimo, pokličite pomoč uporabnikom na številko **059 044 055**.

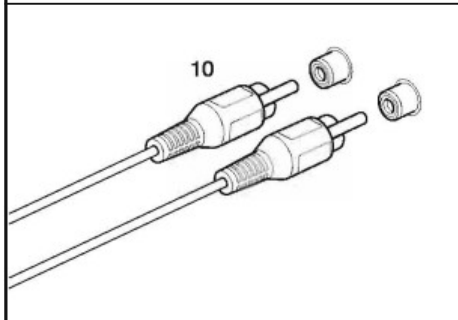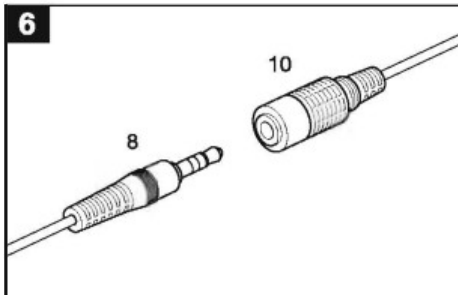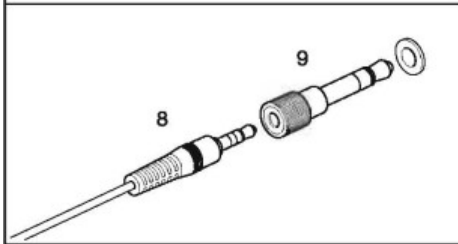
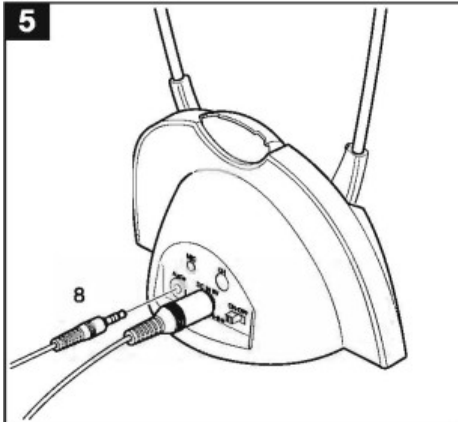


Uporaba 3.5mm v 3.5mm kabla:

Vstavite prvi 3,5mm vtičnik (8) v "Audio" vhod na oddajniku. Drugi 3,5mm vtičnik pa v izhod za slušalke "headphone" na vaši televiziji ali HiFi opremi. Po potrebi uporabite pretvornik iz 3.5mm v 6.3mm vtičnik (9).

Uporaba 3.5mm v RCA kabla:


Vstavite 3.5mm vtičnik (8) v 3.5mm RCA kabel (10). Povežite RCA vtičnike (10) z ustrezno belo/rdečo "OUTPUT" vtičnico na vaši televiziji ali HiFi opremo.

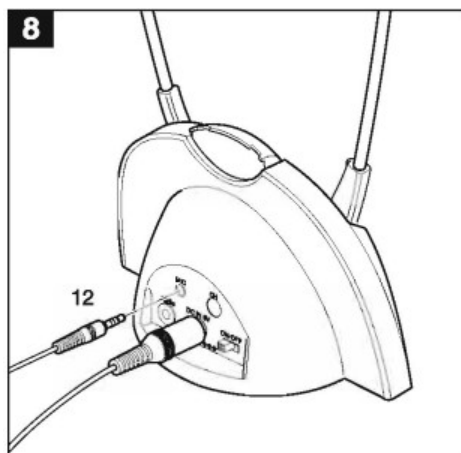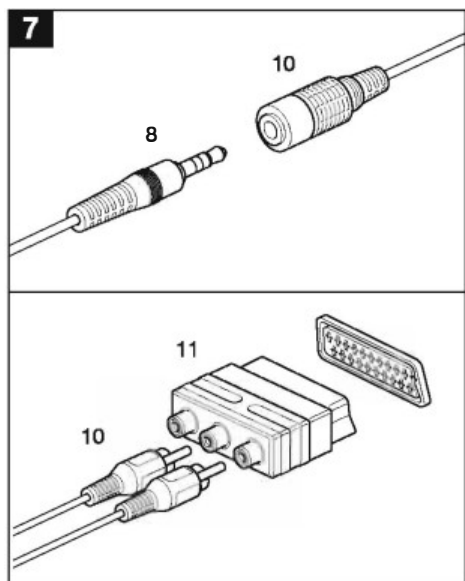

Uporaba scart adapterja: Vstavite 3.5mm vtičnik (8) v 3.5mm RCA nastavek (10). Vstavite scart adapter (11) v kompatibilen scart vhod na vaši televiziji ali HiFi opremi. Povežite ustrezen belo/rdeč RCA vtičnik (10) s scart adapterjem (ne uporabljajte rumene vtičnice).


Povezovanje mikrofona: Uporabite izključno priložen Geemarc mikrofona. Vključite mikrofona vtičnik (12) v "MIC" vtičnico na oddajniku in postavite mikrofona blizu viru zvoka, ki ga želite poslušati.

Pomembno: Ob uporabi mikrofona bodo nivoji glasnosti nižji, pojavi pa se lahko tudi hrup iz ozadja.

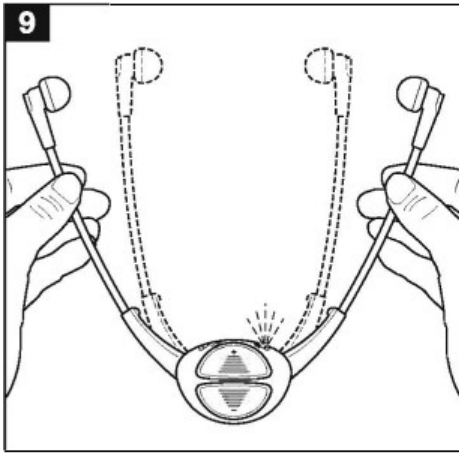

Uporaba slušalk: Potem, ko so slušalke napolnjene in priključene na televizijo ali HiFi opremo, razprite ročice slušalk, da se slušalke vklopijo. Ob vklopu slušalk se bo prižgala zelena lučka.

Slušalke bodo ugasnile, ko boste ročice slušalk stisnili skupaj.

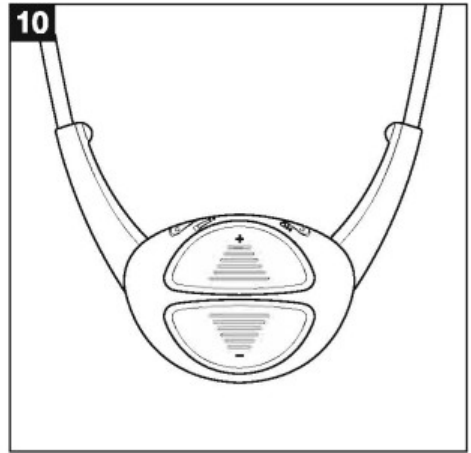

Nastavljanje glasnosti: Pritisnite '+' tipko za povišanje nivoja glasnosti in tipko '-' za zmanjšanje nivoja glasnosti.

Slušalke zapiskajo, ko z nastavljanjem dosežete maksimalen ali minimalen nivo glasnosti.


Prilagajanje slušalk

Glasnost, Ravnovesje, Ton in Mono/Stereo nastavitve so nastavljene na srednje vrednosti in so ustrezne za večino uporabnikov.


Poskrbite, da boste slušalke preizkusili preden boste spreminjali nastavitve.

V primeru, da je potrebno nastavitve spremeniti, za nastavljanje uporabite "drsNIK".

Pomembno: Po končanem spreminjanju nastavitvev, poskrbite, da so nastavitve slušalk nastavljene na glasnost "Volume" kot v koraku 11.

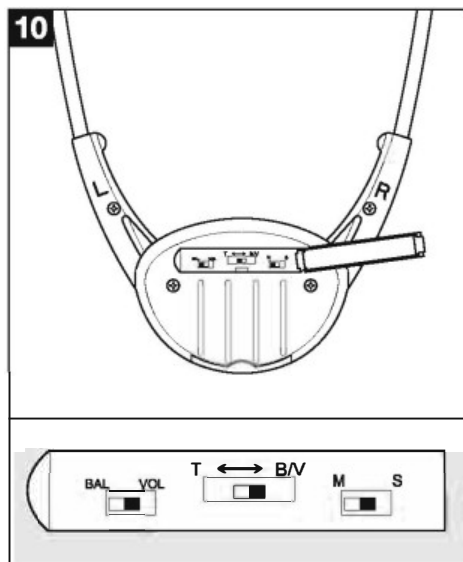

Uporabite drsNIK (5) za nastavljanje Glasnosti, Ravnovesja, Tona ali preklop med Mono/Stereo načinom. Odprite zadnjo ploščo na slušalkah. Tam se nahajajo trije drsniki.

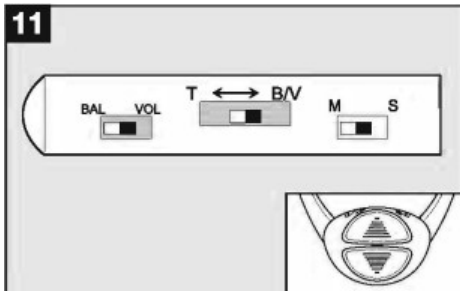


Nastavitev glasnosti:

Nastavite **"BAL VOL"** drsnik na **"VOL"**.

Nastavite **"T <-> B/V"** drsnik na **"B/V"**.

Pritisnite tipko **"+"** za povečanje glasnosti in tipko **"-"** za zmanjšanje glasnosti.

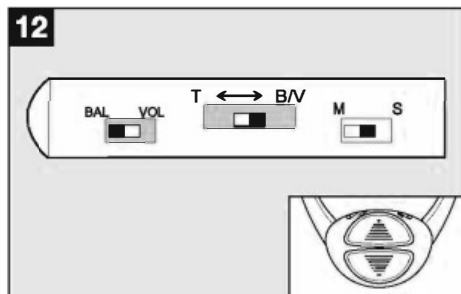


Nastavljanje ravnovesja:

Nastavite **"BAL VOL"** drsnik na **"BAL"**. Nastavite **"T <-> B/V"** drsnik na **"B/V"**.

Pritisnite tipko **"+"** na zmanjšanje signala na DESNI strani.

Pritisnite **"-"** tipko za zmanjšanje signala na LEVI strani.

Slušalke zapiskajo, ko pri nastavljanju ravnovesja dosežete maksimum, sredino ali minimum.

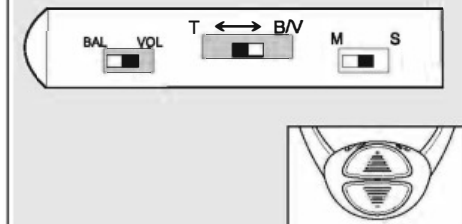13


Nastavljanje tona:

Nastavite **"BAL VOL"** drsnik na **"VOL"**. Nastavite **"T <-> B/V"** drsnik na **"T"**.

Pritisnite tipko **"+"** na povečanje visokih tonov in zmanjšanje nizkih tonov.

Pritisnite tipko **"-"** za zmanjšanje visokih tonov in povečanje nizkih tonov.

Slušalke zapiskajo, ko pri nastavljanju tona dosežete maksimum, sredino ali minimum.

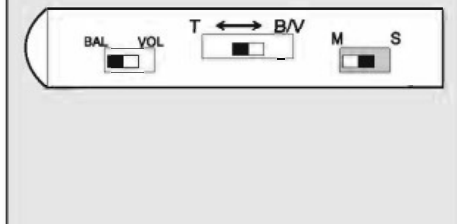
14

Nastavljanje Mono / Stereo tehnike:


Nastavite **"MS"** drsnik slušalk na **"S"** za poslušanje v **"Stereo"** tehniki.

Nastavite **"MS"** drsnik na **"M"** za poslušanje v **"Mono"** tehniki.

Status baterije in polnjenje: V primeru, da so baterije skoraj prazne, bo na slušalkah utripala zelena lučka, skozi slušalke pa se bo slišal nizek pisk.

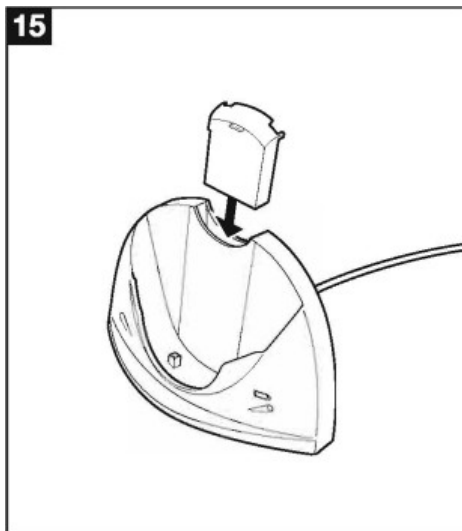

Polnjenje baterije na oddajniku:
Vstavite baterijo v prostor za polnjenje na oddajniku in ga vključite. Med polnjenjem bo svetila rdeča lučka, dokler polnjenje ne bo končano.

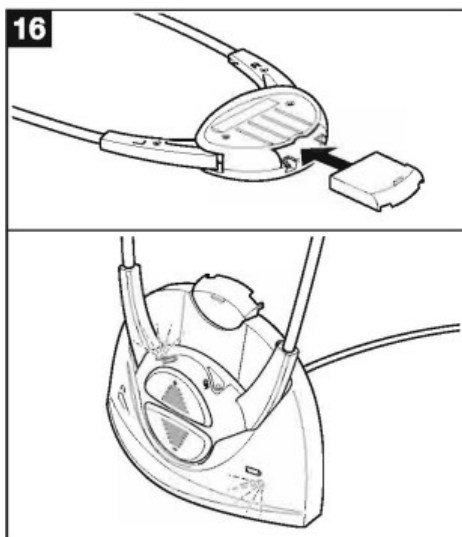

Polnjenje baterije v slušalkah:
Vstavite baterijo v slušalke, slušalke pa postavite na oddajnik. Med polnjenjem bo na slušalkah svetila rdeča lučka, dokler polnjenje ne bo končano.



Povezovanje dodatnih slušalk:

Pomembno: Na oddajnik lahko priključite največ 4 pare slušalk.

Pomembno: Povezovanje mora biti opravljeno med tem, ko lučke na oddajniku utripajo. V primeru, da lučke na oddajniku prenehajo utripati preden je povezovanje končano, morate postopek povezovanja ponoviti.

Za povezovanje oddajnika s slušalkami morajo biti baterije popolnoma napolnjene in oddajnik priključen v električno omrežje.


Sledite naslednjim korakom:

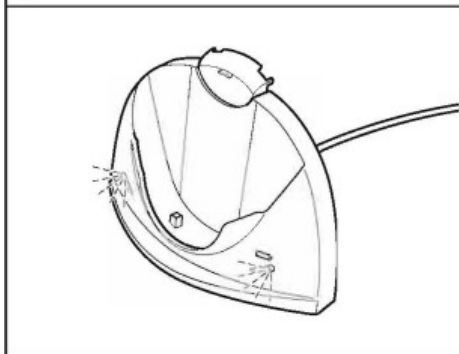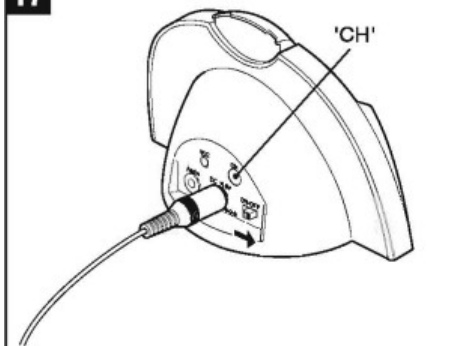17

Oddajnik: Izključite oddajnik.

Pritisnite in držite tipko "CH", vključite oddajnik, nadaljujte z držanjem tipke "CH" dokler ne začnejo utripati obe lučki na sprednji strani oddajnika.


Oddajnik je pripravljen za povezovanje.

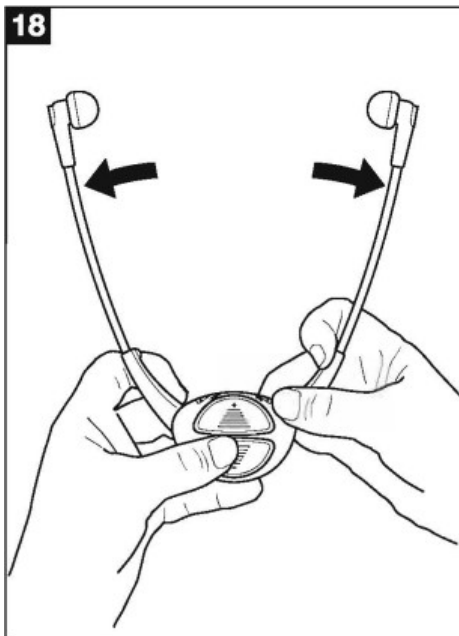18

Slušalke: Pritisnite in držite tipko "-" (minus).

Medtem, ko držite tipko "-", odprite ročice slušalk, da se posveti zelena lučka. Ko bo lučka začela utripati je povezovanje končano.

19

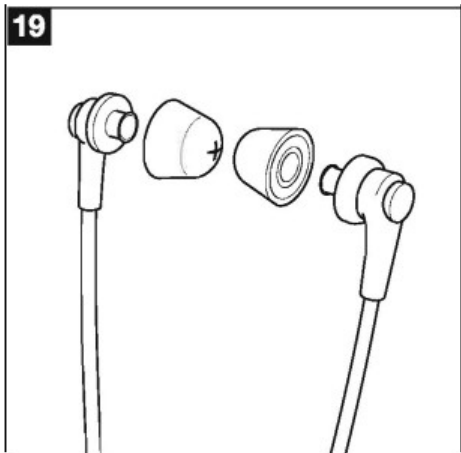

Čiščenje in vzdrževanje:

Pomembno: NE uporabljate alkohola, kemikalij ali ostalih močnih čistilnih sredstev.

Obrišite oddajnik in slušalke s čisto vlažno krpo.

Redno odstranjujte in očistite "Ušesne blazinice" s toplo milnico.

Priloženi sta dve vrsti ušesnih blaznic. Izberite tisti, ki vam najbolj ustrezajo.

Rezervni in nadomestni deli:

Nadomestni deli so na voljo pri dobavitelju ali pri proizvajalcu. Pokličite pomoč uporabnikom na telefonsko številko: **059 044 055**.

1. Bateriji (2x)
2. Dodatne slušalke
3. Ušesne blazinice (oba tipa 2x)

Pomoč uporabnikom:

Za pomoč pri uporabi produkta obiščite našo spletno stran **www.geemarc.com**

Za pomoč uporabnikom pokličite na telefonsko številko: **059 044 055**.

Splošne informacije:

Tehnični podatki:

Digitalni 2.4 GHZ AFHSS prenos (Adaptive Frequency Hopping) - CD kvaliteta!
79 kanalov (20 hopping kanalov).

Sprejemno ojačenje: do 125dBspl.

Frekvenčni razpon 45 - 15000Hz.

Delovanje do razdalje 100m (zunaj) in do 25m (znotraj).

Čas delovanje neprekinjene uporabe: do 3 ure (na eno baterijo).

Polnjenje po potrebi - Slušalke se polnijo, ko jih postavite na oddajnik.

3.5mm avdio vhodni stereo vtičnik access na oddajni enoti.

2.5mm mikrofonski vtičnik na oddajni enoti.

Teža: 50g.