

GEEMARC

CLEAR SOUND™

HEAR THE DIFFERENCE

AMPLIDECT™ COMBI 355

**Posebno Ojačan Telefon Z Velikimi
Gumbi In Telefonsko Tajnico &
Posebno Ojačan Prenosni Digitalni
Telefon**



Slovenščina

PREDSTAVITEV

Vsebina paketa

Paket AMPLIDECT™ COMBI355, vsebuje naslednje:


- 1 AMPLIDECT™ COMBI355 postaja
- 1 AMPLIDECT™ COMBI355 slušalka s kablom
- 1 AMPLIDECT™ COMBI355 slušalka
- 1 AMPLIDECT™ COMBI355 polnilna postaja
- 3 x AAA Ni-MH baterija za polnjenje
- 1 Telefonski kabel
- 2 Omrežna napajalnika
- 1 Nosilna sponka
- 1 Navodila za uporabo



Opis prenosne digitalne slušalke



Opis polnilne postaje:

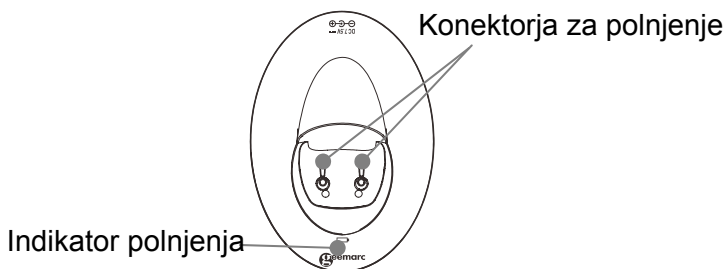


OPIS

Opis glavne postaje:





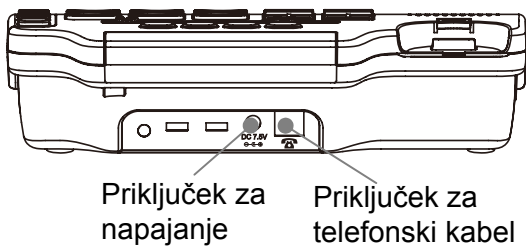




Pogled od zadaj:







OPIS (PRENOSNA SLUŠALKA)

Opis tipkovnice








	<p>Tipka za Klicanje / Zvočnik Začetek klica / Sprejemanje klica. Tipka aktivira zvočnik, če jo pritisnete med klicanjem.</p>
	<p>Tipka za prekinitev klica / Izklop Prekinitev klica. Za izklop / vklop tipko držite dlje časa.</p>
	<p>Navigacijske tipke</p> <p> Navzgor / CID tipka Pomikanje skozi imenik in opcije v meniju. Povečanje glasnosti slušalke in zvočnika med klicanjem. Vstop v telefonski imenik.</p> <p> Navzdol / Imenik Pomikanje skozi imenik in opcije v meniju. Zmanjšanje glasnosti slušalke in zvočnika med klicanjem. Vstop v imenik.</p> <p> INT tipka Interni klic na drugo prenosno slušalko. Prenos dohodnega klica na drugo slušalko. Vzpostavitev konferenčnega klica med dohodnim klicem in drugimi internimi slušalkami</p> <p> Tipka za ponovni klic Vstop v zgodovino klicev. Vnos premora pred ponovitvijo klica.</p>

OPIS (PRENOSNA SLUŠALKA)









	Mehka tipka (leva in desna) Izbira funkcije označene na zaslonu enote.
	Tipka z zvezdico Pritisnite in držite tipko za odklep ali zaklep tipkovnice. Začetek konferenčnega klica.
M1 to M4	Hitro klicanje Štiri nastavljive (slikovne) tipke za hitro klicanje.
	Pritisnite in držite za aktivacijo vibriranja in LED lučk za dohodne klice.
	Pritisnite in držite za aktivacijo lučke.

OPIS (GLAVNA POSTAJA)

Opis tipkovnice


	Tipka za zvočnik Prični/Sprejmi/Končaj klic. Aktivacija zvočnik.
	Tipka za ponovno klicanje Vstop v zgodovino klicev. Vnos premora pred ponovitvijo klica.
	Int tipka Interni klic na drug prenosni aparat. Prenos dohodnega klica na drugo slušalko. Vzpostavitev konferenčnega klica med dohodnim klicem in drugimi internimi slušalkami.
	Tipki za nastavljanje glasnosti Uporabite tipki za nastavljanje glasnosti zvonjenja, zvočnika in slušalke.
M1 to M8	Slikovne tipke Osem slikovnih tipk omogoča hitro klicanje.
	Mehke tipke. Z njimi izbiramo funkcije, ki so označene v tekstu zgoraj (v spodnji vrstici), ki se spremeni glede na vsebino.
	Navzgor / CID tipka Pomikanje navzgor skozi sezname in menije. Povečanje glasnosti slušalke / zvočnika med klicanjem Vstop CID imenik
	Tipka za Navzdol / Imenik Pomikanje navzdol skozi sezname in menije Zmanjšanje glasnosti slušalke / zvočnika med klicanjem Vstop v imenik

OPIS (GLAVNA POSTAJA)

	Tipka za Izklop / Vklop tajnice Pritisnite za vklop/izklop telefonske tajnice. Telefon bo javil 'Answer On' ali 'Answer Off'.
	Predvajaj / Ustavi Pritisnite za začetek ali prenehanje predvajanja sporočil.
	Naprej Pritisnite za predvajanje naslednjega sporočila.
	Nazaj Pritisnite za predvajanje prejšnjega sporočila.
	Brisanje Med predvajanjem sporočila pritisnite to tipko za brisanje. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko za brisanje vseh sporočil.
 	Tipki Annc1 / Annc2 Pritisnite za predvajanje vašega Sporočila1 in Sporočila 2. Pritisnite in držite za snemanje Sporočila1 in Sporočila 2.
	Tipka za Lociranje / Tihi način Locirajte povezano slušalko. Povežite novo slušalko. Tihi način med klicem.

OPIS (SLUŠALKA IN POSTAJA)

Opis LCD Zaslona

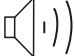	Ikona za moč zaslona Ta ikona je vedno prisotna, ko je telefon prižgan. Ikona prikazuje trenutno moč signala. Več črtic pomeni močnejši signal. V primeru, da je slušalka preveč oddaljena od postaje, ta ikona utripa.
	Ikona za slušalko Ta ikona pomeni, da je žična slušalka aktivna.
	Prostoročni način Ikona pomeni, da je aktiviran prostoročni način.
	Ikona za zgrešene klice Ikona naznanjuje enega ali več zgrešenih klicev.
	Zaklepanje Ikona pomeni, da je tipkovnica telefona zaklenjena.
	Stanje Baterije Ta ikona je vedno prisotna, ko je telefon prižgan. Prikazuje stanje polnjenja baterije. Več kot je črtic v ikoni, bolj je polna baterija.
	Ikona za dohodna sporočila (slušalka) Ikona pomeni, da imate na odzivniku nova sporočila.
	Dohodna sporočila (postaja) Ikona pomeni, da imate na odzivniku nova sporočila.
	Ikona za alarm (slušalka) Ikona pomeni, da je alarm aktiviran in nastavljen na zvonjenje ob določeni uri.

NAMESTITEV (PRENOSNA SLUŠALKA)


Lokacija

Poskrbite, da bo telefon postavljen dovolj blizu električne vtičnice tako, da kabel ne bo prekomerno napet. Prav tako pokrbite, da bo električna vtičnica dostopna tako, da boste napravo zlahka izklopili iz električnega omrežja.

Telefon postavite tako, da bo ta od drugih električnih naprav kot so radio, TV, ipd. oddaljen najmanj 1 meter, da bi se izognili motnjam delovanja telefona. Napravo ne izpostavljajte virom toplote ali direktni sončni svetlobi.


Svetujemo vam, da telefon postavite na prt ali drugo podlago, saj gumijasti nosilci telefonske postaje lahko puščajo sledi na površinah.

Domet slušalke

Domet telefona v zaprtih prostorih je 30 - 50 metrov, na odprtem pa do 300 metrov. Domet delovanja se bo zmanjšal, ko slušalka ne bo več v vidnem polju postaje. Postavite postajo na čim višje praktično mesto, da bi zagotovili najboljšo povezavo med postajo in telefonom. V primeru, da boste s slušalko preveč oddaljeni od postaje bo ikona  v zgornji levem kotu LCD zaslona utripala, črtice za signal pa bodo izginile. Postaji se v tem primeru približajte - povezava med postajo in slušalko bo spet vzpostavljena.


Namestitev

Vklopite napajalni kabel v vtičnico za napajanje na telefonski postaji. Vklopite napajalni adapter v električno vtičnico in vklopite napajanje.

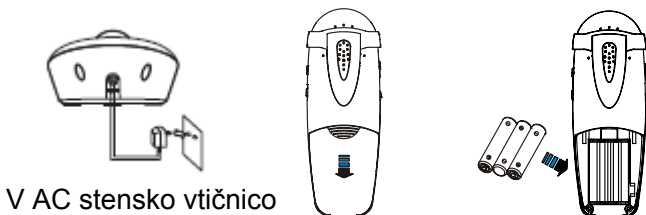

NAMESTITEV (PRENOSNA SLUŠALKA)

Vstavite polnilne baterije v slušalko. Slušalka za delovanje potrebuje tri (NiMH) AAA baterije. Te so priložene v paketu s telefonom. Pomaknite baterijska vratca slušalke v smeri puščic in jih odstranite. Med vstavljanjem baterij v slušalko bodite pozorni na pravilno polariteto. Baterijska vratca pomaknite nazaj dokler se ta ne zaskočijo (klik).

Postavite slušalko na polnilno postajo tako, da boste zališali pisk. Na LCD zaslonu slušalke se bo pokazala ikona baterije. Po končanem polnjenju se bo na LCD zaslonu slušalke pojavila ikona polne baterije  .




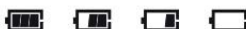
Telefon ima vgrajen poseben senzor, ki preprečuje, da bi baterijo slušalke prekomerno napolnili.

Pred uporabo slušalke je potrebno baterije polniti najmanj 15 ur na AMPLIDECT™ COMBI355 polnilni postaji.

NAMESTITEV (PRENOSNA SLUŠALKA)

Stanje Baterije


Ikona  baterije je vedno prisotna v desnem zgornjem kotu LCD zaslona. Prikazuje stanje baterije telefona. Več kot je črtic v ikoni, bolj polna je baterija.



V primeru, ko baterija ne bo dovolj polna za delovanje, se bo telefon samodejno izklopil. Za polnjenje baterije, postavite slušalko na polnilno postajo. V idealnih pogojih bo baterija slušalke zagotavljala 6 ur pogovorov in 150 ur stanja pripravljenosti z enim samim polnjenjem.

Nosilna sponka slušalke

Nosilna sponka omogoča, da slušalko lahko pripnete za pas ali žep. V primeru, da želite sponko odstraniti, vstavite izvijač po robu ročice sponke in odprite sponko. Sponko nato dvignite in odstranite.

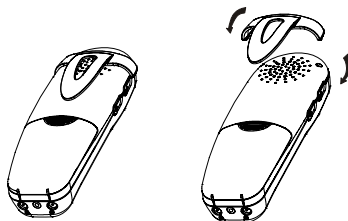

NAMESTITEV (GLAVNA POSTAJA)

Namestitev

Povežite en konec navitega kabla v slušalko, drug konec kabla pa v vtičnico na levi strani postaje AMPLIDECTTM COMBI355. Place the handset on the cradle. Postavite slušalko na stojalo za slušalko.

Povežite telefonski kabel v vtičnico na zadnji strani postaje, drug konec pa povežite z telefonsko vtičnico na steni.


Povežite napajalni adapter z napajalno vtičnico na zadnji strani telefona, drug konec pa v električno vtičnico. Prosimo izberite vtičnico, ki je v bližini telefonske postaje tako, da lahko telefon zlahka izklopite iz električnega omrežja v primeru težav.

Nameščanje na steno


Pomaknite nosilec slušalke iz postaje in ga obrnite okoli (rotirajte ga za 180 stopinj). Pomaknite ga nazaj na svoje mesto tako, da bo kljukica usmerjena navzgor (glejte sliko1). S tem boste preprečili, da bi slušalka padla s stojala, ko bo postaja nameščena na steno.

V steno vertikalno vstavite 2 vijaka (nista priložena) tako, da bo med njima razdalja 80mm.

Postavite telefon na vijaka in ga pomaknite navzdol, da se ta zatakne v stabilen položaj (glejte sliko 2).

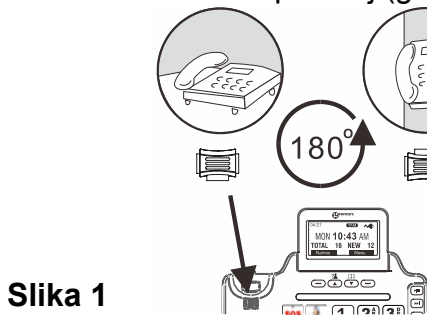

Slika 1

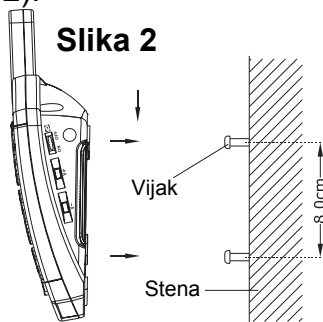

Slika 2

ODPRAVLJANJE NAPAK (SLUŠALKA)

Splošni napotki

- Poskrbite, da sta telefonski kabel in napajalni adapter pravilno povezana in nepoškodovana.
- Poskrbite, da so baterije vstavljene pravilno.
- Poskrbite, da so baterije ustrezno napolnjene.
- Povežite drug telefon v telefonsko vtičnico PTT ali priklopite ta telefon v drugo PTT vtičnico, da bi izvedeli ali je težava v telefonu ali telefonski vtičnici.
- Poskrbite, da je napajalni adapter pravilno vklopljen.

Slušalka se ne poveže

- Glejte splošne napotke.

Na zaslonu ni slike

- Glejte splošne napotke.
- Preverite ali je slušalka pravilno povezana.

Ni povezave med slušalko in postajo

- Morda ste s slušalko preveč oddaljeni od postaje. Pomaknite se bližje postaji.

Slušalka se na polnilni postaji ne polni

- Poskrbite, da je slušalka pravilno postavljena na napajalni postaji. Med polnjenjem se ikona baterije na zaslonu polni.

Slušalka ne zvoní

- Glejte splošne napotke.
- Poskrbite, da je zvonjenje na slušalki vključeno.

Ni zvoka, ko pritisnem



- Glejte splošne napotke.
- Preverite številko slušalke na LCD zaslonu, npr. HS1. V primeru, da številka na zaslonu ni prisotna, je potrebno slušalko povezati s postajo.

Med pogovorom slišim opozorilni ton

- Baterije so prazne. Slušalko je potrebno postaviti na napajalno postajo, da se ta napolni.
- Nahajate se izven dometa postaje.

Številka dohodnih klicateljev se ne prikaže:

ODPRAVLJANJE NAPAK (SLUŠALKA)

- Prosimo, s svojim telefonskim operaterjem se dogovorite, da vam omogoči funkcijo za identifikacijo klicatelja (caller ID).
- Tudi, če že imate caller ID funkcijo, klicatelj morda ne želi deliti svoje številke. V tem primeru se bo na zaslonu izpisalo **'PRIVATE'**. Izpis **'OUT OF AREA'** se lahko pojavi v primeru, ko gre za klic iz tujine.

Baterije se hitro izpraznijo

- Očistite konektorje za polnjenje.
- Zamenjajte baterije.

Tipke / tipkovnica se ne odziva

- Preverite ali je vključen zaklep tipkovnice.

ODPRAVLJANJE NAPAK (POSTAJA)

Zaslon je prazen

- Poskrbite, da je napajalni adapter pravilno priključen in nepoškodovan.
- Preverite ali se kje nahaja slaba električna povezava.

AMPLIDECT™ COMBI355 ne zvoní

- Poskrbite, da je telefonski kabel pravilno priključen in nepoškodovan.
- Povežite drug telefon v telefonsko vtičnico PTT ali priklopite ta telefon v drugo PTT vtičnico, da bi izvedeli ali je težava v telefonu ali telefonski vtičnici.
- Morda je s telefonom povezanih preveč drugih komunikacijskih naprav npr. modem... Posvetujte se s telefonskim ponudnikom za pomoč pri izračunu podatkovne meje vašega domačega ali poslovnega omrežja.
- Preverite nastavev glasnosti zvonjenja.

Ni klicnega tona

- Poskrbite, da je telefonski kabel pravilno priključen in nepoškodovan.
- Povežite drug telefon v telefonsko vtičnico PTT ali priklopite ta telefon v drugo PTT vtičnico, da bi izvedeli ali je težava v telefonu ali telefonski vtičnici.
- Morda je s telefonom povezanih preveč drugih komunikacijskih naprav npr. modem... Posvetujte se s telefonskim ponudnikom za pomoč pri izračunu podatkovne meje vašega domačega ali poslovnega omrežja.
- Preverite ali je način klicanja nastavljen na pravilno nastavev (tonsko or pulzno).

Motnje zvoka med klicanjem

- V primeru, da uporabljate DSL linijo, poskrbite, da je filter pritrjen na vse telefonske vtičnice.

Identiteta klicatelja se ne prikaže

- Poskrbite, da ste se s svojim ponudnikom telefonskih storitev dogovorili za vklop funkcije za identifikacijo klicatelja (Caller ID).

VARNOSTNA OPOZORILA

Splošno

Uporabljajte izključno priložen napajalni adapter.

Uporabljajte izključno predpisane polnilne baterije, ki so priložene.

Ne odpirajte slušalke (z izjemo menjave baterij) ali postaje. Za popravila pokličite servis.

Baterij nikol ne izpostavljajte ognju. Gre za resno nevarnost eksplozije in / ali prisotnost strupenih snovi.

Ne postavljajte predmetov na telefonski ali napajalni kabel, da ne povzročite poškodb.

V primeru, da telefona ne boste uporabljali več kot mesec dni, odstranite baterije iz naprave.

Čiščenje

Odklopite telefon. Očistite telefon z mehko krpico. Poskrbite, da so polnilna postaja in polnilni kontektorji čisti. Nikoli ne uporabljajte polirnih čistil ali močnih kemičnih čistil - ta lahko poškodujejo površino ali elektronsko vezje v notranjosti naprave.

Varnost

Naprave ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi.

Poskrbite, da je v okolici telefona vedno svež pretok zraka.

Ne postavljajte katerega koli dela tega produkta v vodo. Ne uporabljajte naprave v vlažnih zaprtih prostorih kot je kopalnica itd.

Naprave ne izpostavljajte ognju ali drugim nevarnim okoliščinam.

Telefon v času neviht izklopite, saj udarec strele lahko poškoduje vaš telefon. Garancija ne krije poškodb udarca strele.

Telefon je oblikovan in izdelan, da deluje na temperaturah od 5°C do 45°C.



UGAMPLIDECT COMBI355_En_V.1.0

geemarc UNITED KINGDOM

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support:
01707 384438
www.geemarc.com