

Xen

## Xen brezžični telefon z močnim ojačanjem



**MultiSens**




**SLO**

Navodila za uporabo

# Xen - opis


## Slušalka

1. LCD zaslon
2. Funkcijski gumbi
3. Slušalka/Sprejemnik
4. Mikrofon
5. Svetlobna leča
6. Pokrov za baterije
7. Kontakti za polnjenje
8. Vhod za silhueto ali slušalke
9. Sponka za pas

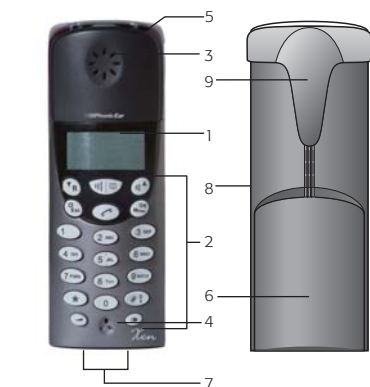


## Polnilna postaja


10. Kontakti za polnjenje
11. Pozivni gumb
12. Indikator za polnjenje/zasedenost/klic
13. Vhod za napajalni adapter
14. Vhod za telefonsko linijo
15. Odprtina za stensko montažo

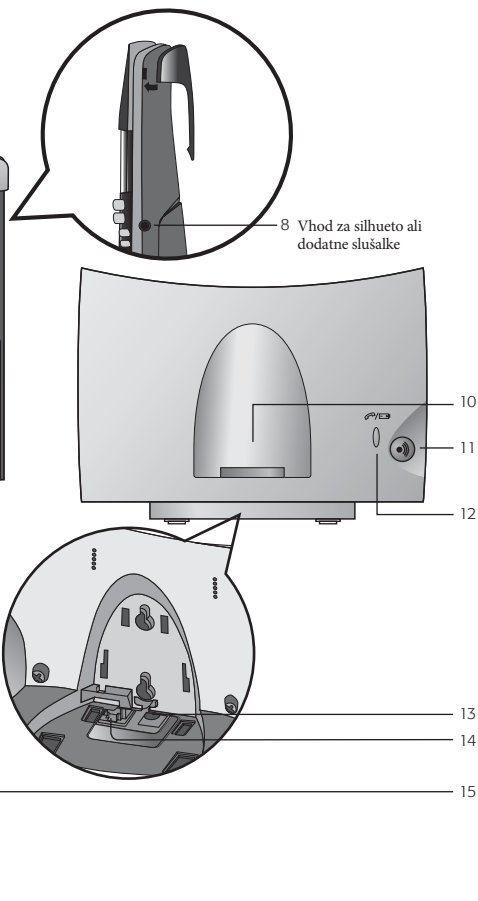


# Xen - namestitev


1. Vhod za telefonsko linijo se nahaja na spodnji strani polnilne postaje in je označen z naslednjim simbolom .


Povežite en del kabla za telefonsko linijo s polnilno postajo, drug konec pa vklopite v stensko vtičnico za telefonsko linijo.

2. Za povezavo polnilne postaje z električnim omrežjem uporabite napajalni vhod, ki se nahaja na spodnji strani polnilne postaje in je označen z naslednjim simbolom . Del napajalnega kabla na katerem se nahaja napajalni vtič vklopite v napajalni vhod telefonske postaje. Napajalni adapter vklopite v električno omrežje oz. stensko vtičnico.

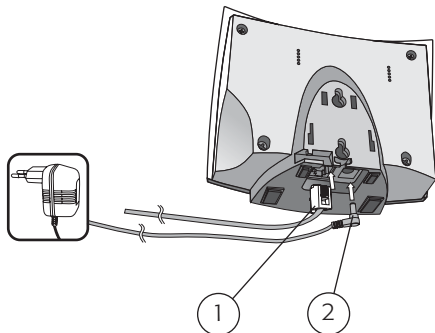

3. Namestitev baterij v slušalko (priporočljivo je, da bateriji menjate vsake 2 leti).
  - a. Odprite pokrov za baterije
  - b. Vstavite dve bateriji za polnjenje in bodite pozorni na pravo polariteto, ki je označena znotraj prostora za baterije

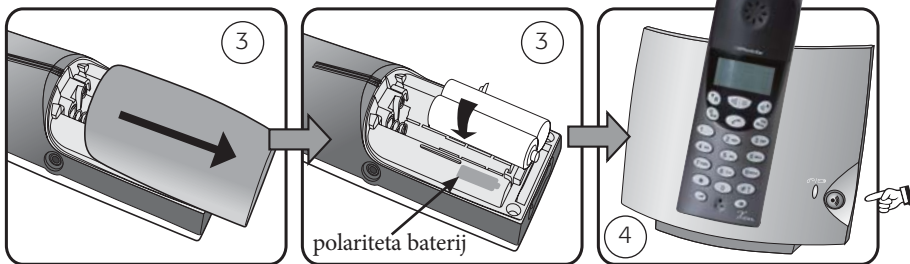









4. Slušalko postavite na polnilno postajo  
Potem, ko so baterije polne in pravilno vstajljene, bo polnilna postaja zasvetila. To pomeni, da se baterije polnijo (glejte polnilno postajo .

**POMEMBNO:** LED lučka na polnilni postaji naznanja polnjenje (lučka miruje) ali da je telefon v uporabi (lučka utripa).

**POZOR:** Za ohranjanje življenske dobe baterij, telefon pred prvo uporabo polnite vsaj 15 ur.

# Xen - funkcije gumbov

Vsak gumb ima več funkcij:

Gumb	V pripravljenosti	Med pogovorom	Nastavljanje/Izbiranje
	Javljanje na dohodne klice ali klicanje	Prekinitve pogovora	Med ogledom telefonskega imenika pritisnite, da začnete klic osebe iz imenika
<b>0-9</b>	Vnesite številke 0-9	Pošljite tonski signal 0-9	Vnesite števila 0-9 ali črke
<b>*</b>	Vnesite simbol *	Pošljite tonski signal *	Vnesite simbol *
<b>#</b> 	Vnesite simbol # ali pritisnite in držite za zaklepanje tipkovnice	Pošljite tonski signal #	Vnesite simbol #
 R		Preklapljanje med dvema vsticama	Pomikanje navzdol med iskanjem po imeniku
 	Ogled nedavnih klicev	Vklop zvočnika	Pomikanje navzgor med iskanjem po imeniku
<b>OK</b> MENU	Vstop v nastavitveni meni in potrditev izbire	Vstop v Intercom meni in izvedba vezave klica	Potrditev izbire
	Seznam za ponovno klicanje		
<b>Q</b> Esc		Tihi način	Preklic izbire
	Hiter vstop v meni za izbiro načina zvonjenja RING SEL	Prilagodite glasnost slušalke	
	Vstop v telefonski imenik	Ojačanje glasnosti in brskanje po telefonskem imeniku Pošljite tonski signal	Shranite številko na zaslonu v telefonski imenik

# Xen - pomen simbolov


LCD Zaslou:



BU-1 HS-1	Ime in številka slušalke
	Indikator neprebranih sporočil
	Simbol za pregled telefonskega imenika se prikaže med iskanjem po telefonskem imeniku
	Nastavitveni meni
	Indikator stanja baterij
	Zvonenje izklopljeno
	Pogovor
	Mikrofon v slušalki izklopljen
	Identiteta klicatelja (CID)
	Ojačana glasnost
	Konstanten prikazni simbol antene pomeni dobro radijsko povezavo Utripajoč simbol antene pomeni, da je radijski signal izven dosega postaje

## Glavni meni

Pritisnite gumb za vstop v meni funkcij in gumb ter za pomikanje po meniju.

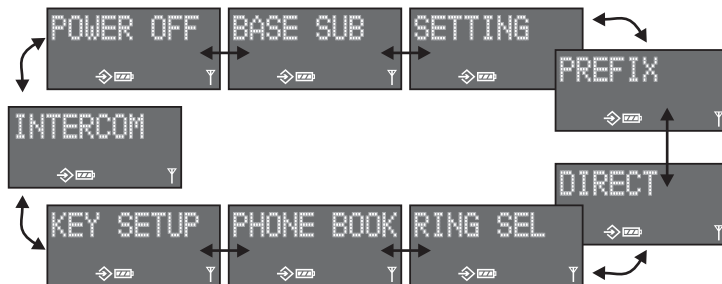

Za prilagajanje nastavitve telefona uporabite kombinacijo gumba za potrditev gumba za preklc ter gumbov za pomikanje navzgor / navzdol / .

# Xen - nastavitve

## Nastavitev jezika

Privzeta tovarniška nastavitev jezika je nastavljena na angleški jezik.

Zaporedje gumbov:




1. Uporabite gumba / za pomik po seznamu jezikov.
2. Za izbiro željenega jezika pritisnite gumb . Potrditev izbire bo naznanil dolg pisk.

## Nastavitev vibriranja in svetlobnega utripanja (Vkllop in Izklop)

V primeru, da je ta funkcija aktivirana bo slušalka vibrirala in utripala kot opozorilo na dohodni klic.

Zaporedje gumbov:

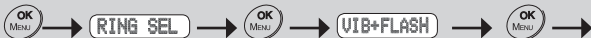

1. Uporabite gumba / za izbiro med vklopom ON in izklopom OFF.
2. Za potrditev pritisnite gumb . Potrditev izbire bo naznanil dolg pisk.

## Nastavljanje datuma in časa

Zaporedje gumbov:



1. Za vnos datuma in ure uporabite številčno tipkovnico na telefonu DATE/TIME.
2. Po končanem vnosu pritisnite gumb za potrditev. Potrditev bo naznanil dolg pisk.



# Xen - telefonski imenik

V telefonski imenik lahko shranite do 50 kontaktov (10 znakov in 24 številke za vsak vnos oz. kontakt)

## Vnašanje nove številke v imenik

Zaporedje gumbov:







1. Uporabite alfanumerične gube (2 do 9) za vnos imena. Gumb z željeno črko pritisnite večkrat dokler se na zaslonu ne prikaže željena črka. Za potrditev pritisnite gumb .
2. Za vnos telefonske številke uporabite numerične gube (0-9). Za potrditev pritisnite gumb . Potrditev izbire bo naznanil dolg pisk.





## Klicanje telefonske številke iz telefonskega imenika

Zaporedje gumbov:



1. Uporabite alfanumerične gube za vnos prve črke imena željene osebe in pritisnite .
2. Prikazala se bodo vsa imena z začetno črko, ki ste jo izbrali.
3. Uporabite gumba  /  za pomik do željenega kontakta, ki ga želite poklicati.
3. Pritisnite gumb  za klicanje.

## Hiter dostop do telefonskega imenika

1. Pritisnite gumb .
2. Skozi imenik se pomaknite do željenega kontakta s pomočjo gumbov  / .
3. Pritisnite gumb  za klicanje.

# Xen - vzdrževanje


---

## Vzdrževanje


1. Naprave ne izpostavljajte prahu, sončni svetlobi, vlagi, visokim temperaturam ali udarcem.
2. Za čiščenje ne uporabljajte močnih čistil. Napravo čistite z mehko, suho krpo.
3. Naprave ne razstavljajte sami, saj ta ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih lahko zamenjali ali popravili doma.
4. V času neviht in grmenja je priporočljivo, da napravo izklopite iz električnega omrežja, saj garancija ne pokriva poškodb, ki so posledica udarca strele.
5. Uporabljajte izključno napajalni adapter in baterije, ki so bile priložene v paketu.



# Xen - postavitvev in stenska montaža

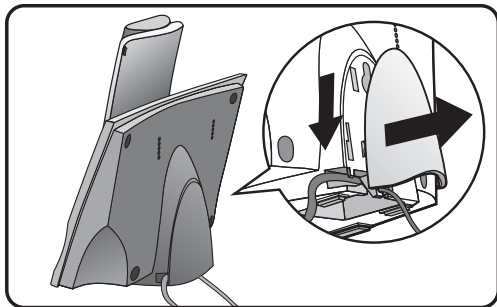

Slika A

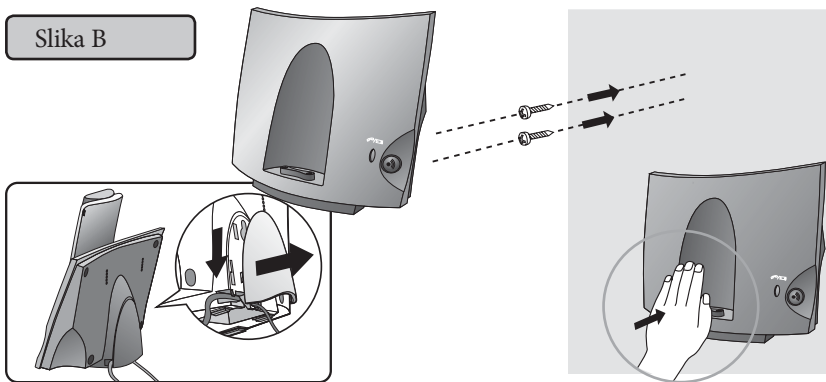


Slika B



Položaj vijakov v razmerju 1:1.  
Izrežite spodnji del tega lista  
in ga uporabite za mero pri  
vrtanju lukenj za vijake.



35 mm

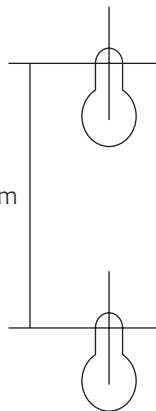

Osnutek za stensko montažo

Manufactured by:  **Phonic Ear**<sup>®</sup>  
Connected to life

Kongebakken 9 • 2765 Smørum • Denmark  
Phone: +45 3917 7101 • Fax: +45 3927 7900  
E-mail: [mail@phonicear.com](mailto:mail@phonicear.com)

Zastopnik za Slovenijo:

**AUDIOBM**

**Info telefon:** 059 044 055  
**E-mail:** [info@audiobm.si](mailto:info@audiobm.si)  
**Spletna stran:** [www.audiobm.si](http://www.audiobm.si)

